



Babydoppler Connect

A062201

Návod k použití

Vhodné prostředí:

teplota -10°C až +55°C / vlhkost <93% / atmosférický tlak 50kPa až 106kPa.


Děkujeme, že jste si vybrali Babymoov Babydoppler Connect.
DŮLEŽITÉ – DŮKLADNĚ SI PROČTĚTE TYTO POKYNY A PONECHTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Babydoppler Connect můžete připojit k volně aplikaci Babydoppler Connect, která je k dispozici v App Store a Google Play a je určena k poslouchání a zaznamenávání rytmu srdečního tepu dítěte a jeho sdílení s Vašimi nejbližšími.

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAČKA
Cocoon Life je registrovaná ochranná značka společnosti L.A.T.L. SAS, fungující pod názvem LATL TECHNOLOGIE.
Tento návod je chráněn mezinárodními autorskými právy. Jakákoli reprodukce, distribuce, překlad nebo přenos jakéhokoli prostředku tohoto dokumentu nebo jeho části je zakázáno.
Apple Store je registrovaná ochranná známka společnosti APPLE Inc.
Google Play je registrovaná ochranná známka společnosti GOOGLE Inc.

- BALENÍ OBSAHUJE**
- 1 Babydoppler Connect
 - 1 sluchátka
 - 1 návod k použití
 - 1 kabel
 - 1 ultrazvukový gel 40ml

UPOZORNĚNÍ A ODPOVĚDNOST VÝROBCE
Babydoppler Connect byl vyvinut v souladu s evropskou směrnicí 93/42/EEC (třída I) a souvisejících norem.
Babydoppler je určen pro širokou veřejnost starší 14 let za účelem zjištění srdečního tepu plodu. Nesmí být používán k vypracování lékařské diagnózy nebo k terapii založené na shromážděných informacích prostřednictvím tohoto přístroje. Pouze lékaři jsou oprávněni vydávat lékařskou diagnózu. Babydoppler v žádném případě nenahrazuje lékařský dohled. Pokud neslyšíte tlukot srdce dítěte, může to být proto, že Babydoppler není správně umístěn, není použit ultrazvukový gel, kabely nejsou správně zapojeny nebo jsou nefunkční baterie. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ KONTAKTUJTE SVÉHO LÉKAŘE. Baby Doppler je dodáván s kabelem speciálně vyvinutým pro poslech srdíčka vašeho dítěte na smartphonu či tabletu. **POUŽITÍ JINÉHO KABELU, NEŽ TOHO, KTERÝ BYL DODÁN SPOLU S TÍMTO VÝROBKEM, MŮŽE POŠKODIT VÁŠ SMARTPHONE NEBO TABLET. POUŽÍVEJTE POUZE kabel, který byl dodán s výrobkem BABYDOPPLER CONNECT.**
Měli byste také opatrně manipulovat s Babydoppler Connect a jeho kabelem. Neotáčejte nebo neničte kabel a nepokoušejte se sami demontovat nebo opravit Babydoppler nebo kabel. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY se zříkají nést odpovědnost v případě poškození Babydoppleru, smartphonu nebo tabletu vzniklého s použitím jiného kabelu, než toho, který je dodáván spolu se zařízením Babydoppler.
BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY se zříkají nést jakoukoliv odpovědnost v případě nesprávného používání, špatné údržby nebo změn nebo oprav Babydoppleru a kabelů osobami, které nejsou k tomuto účelu oprávněny společností BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY.
Tento přístroj v žádném případě nenahrazuje lékařský dohled. Nejedná se o lékařský přístroj.

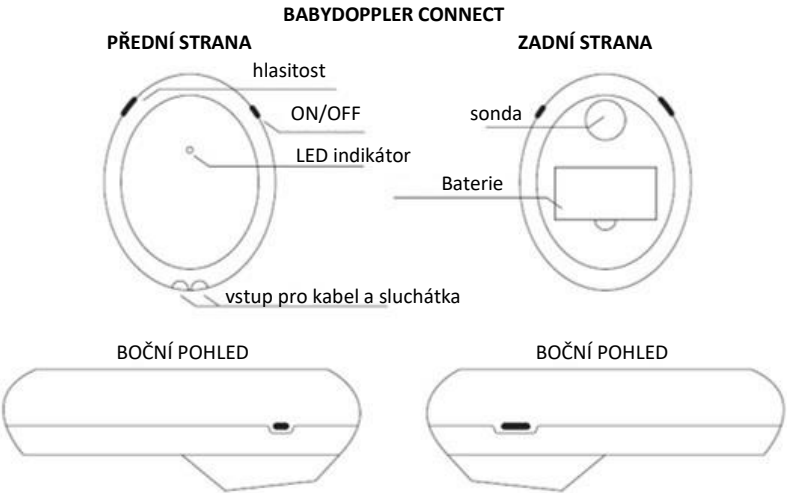

- BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
Uživatel může používat a udržívat Babydoppler a jeho příslušenství podle tohoto návodu. Babydoppler Connect je napájen 2x 1,5 V bateriemi typu AAA (nejsou součástí) . **Abyste předešli potenciálnímu nebezpečí, používejte Babydoppler Connect podle následujících bezpečnostních pravidel:**
1. Neotevírejte kryt na baterie je-li přístroj zapnutý.
 2. Přístroj sami neotevírejte ani jej nedemontujte.
 3. Dodržujte správnou polaritu baterií (vkládejte se ve správném směru).
 4. Pokud Babydoppler delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii a uchovávejte je na suchém a tmavém místě.
 5. Přístroj Babydoppler i příslušenství udržujte v suchu. Vlhkost a tekutiny mohou elektroniku poškodit.
 6. Přístroj Babydoppler i jeho příslušenství neskladujte na místech s vysokou koncentrací prachu. Prach nebo mikročástice mohou způsobit poruchy.
 7. Přístroj Babydoppler i jeho příslušenství nedávejte do blízkosti zdrojů tepla. Mohlo by dojít k vytečení baterií.
 8. Přístroj Baby doppler není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavých kapalin a plynu.
 9. Baterie neházejte do ohně, může dojít k výbuchu.
 10. Elektromagnetické rušení – přístroj Babydoppler nepoužívejte v bezprostřední blízkosti mobilního telefonu nebo jakéhokoliv radiového vysílače; mohlo by to způsobit elektromagnetické rušení.
 11. Toto zařízení nelze použít s defibrilátorem ani s žádným vysokofrekvenčním lékařským zařízením.
 12. Vyvarujte se nárazům na zařízení či jeho spadnutí.
 13. Používejte Babydoppler a jeho příslušenství pouze za účely, ke kterým je určen.
 14. Nedovoľte dětem, aby používali toto zařízení a jeho příslušenství.
 15. Babydoppler by měl být aplikován pouze na zdravou pokožku. Pokud si nejste jisti fyziologickým stavem pokožky, přístroj nepoužívejte.
 16. Doporučený gel je hypoalergenní přípravek, nedráždivý a nekorozivní. Máte-li po použití gelu jakoukoliv negativní reakci, zastavte aplikaci a použití konzultujte s lékařem.
 17. Babydoppler by měl být po každém použití vyčištěn podle doporučení – viz. dále.
 18. Babydoppler by se neměl používat před 12. týdnem těhotenství.
 19. Babydoppler a jeho příslušenství by měly být recyklovány na konci svého životního cyklu v souladu s platnými ustanoveními.
 20. Dávejte pozor na uškrcení v důsledku kabelů, zejména v důsledku nadměrné délky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Ochranná známka + Obchodní reference	Babydoppler Connect
Bezpečnostní třída	typ CF IEC 60601-1:2005 + A1:2012
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 60601-1-2 třída B skupina 1
Napájení	2x 1,5V AAA baterie, spotřeba energie < 1 W
Vhodné použití	Od 12-tého týdne těhotenství
Vhodné prostředí	Během použití: - teplota: od +5°C až do 40°C - vlhkost: max. 80% - atmosférický tlak: od 70 kPa do 106 kPa Během dopravy a skladování: - teplota: od -10°C až do 55°C - vlhkost: max. 93% - atmosférický tlak: od 50 kPa do 106 kPa
Fyzikální vlastnosti	Rozměr: 105 x 90 x 36mm Hmotnost: cca 80g (včetně baterií)
Sonda	Nominální frekvence: 3 MHz Provozní frekvence: 3 MHz ± 10% Výstupní akustický výkon: < 1 MPa Ispta: < 100 mW/cm² MI et TI < 1 Intenzita ultrazvuku: Iob < 20 mW/cm² Efektivní vyzařovací plocha snímače < 208 mm²


Babydoppler Connect je velmi kompaktní, přenosné elektronické zařízení s nízkou spotřebou, určené pro poslouchání rytmu srdečního tepu dítěte u těhotnými ženami a jejich rodin. Přestože je v souladu s evropskou směrnicí 93/42 / EHS (třída I) a souvisejících standardů, není určeno pro lékařské diagnostické účely a používá se ve spojení s mobilní aplikací Babydoppler Connect a speciálním kabelem dodaným k tomuto účelu. Přístroj Babydoppler Connect má vysoce citlivou sondu 3 MHz a jeden zvukový výstup pro připojení ke smartphone / tabletu, za pomoci kabelu speciálně navrženého firmou BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY a dodávané spolu se zařízením Babydoppler Connect. **POUŽÍVÁNÍ JINÉHO KABELU MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ A ZTRÁTU SMARTPHONE NEBO TABLETU. POUŽÍVEJTE POUZE DODÁVANÝ KABEL.**

Intenzita ultrazvuku vyzařovaného Babydoppler Connect je mnohem slabší než stanovují platné předpisy.


SYMBOLY	
Logo / znak	Význam
	Označení CE
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Podívejte se na dokumentaci
	Typ CF: použitá část
	Nevyhazujte do směsného odpadu: zlikvidujte spolu s elektrickým a elektronickým zařízením
	Vstup pro smartphone
	Vstup pro sluchátka
	Tlačítko ON/OFF
	Nastavení hlasitosti
	Datum výroby
	Adresa výrobce
	Ochranná známka

POUŽITÍ

1. Nainstalujte aplikaci Babydoppler Connect na tablet nebo smartphone z App Store nebo Google Play platformy (klíčové slovo «Babydoppler Connect»).
 2. Než přístroj poprvé použijete, vložte 2 baterie 1,5V typu AAA (dbejte na správnou polaritu).
 3. Připojte dodaná sluchátka do příslušné zdířky konektoru (1).
 4. Zapněte Babydoppler Connect stisknutím tlačítka ON/OFF na pravé straně zařízení po dobu 2 sekund. LED kontrolka by se měla rozsvítit. Pokud tomu tak není, zkontrolujte polaritu baterií. Při slabém stavu baterie bude světlo blikat.
 5. Aplikujte ultrazvukový gel (2) a umístěte sondu na matčino břicho. Přibližnou polohu určíte podle týdne těhotenství – viz. schéma (3). Sondu mírně poutavte, dokud neuslyšíte tlukot srdce dítěte.
 6. Nastavte hlasitost sluchátek (4 úrovně) díky tlačítku na levé straně zařízení. Krátkým stisknutím tlačítka dojde ke změně hlasitosti o 1 úroveň. Dlouhým stisknutím změníte hlasitost rychleji.
 7. Spusťte aplikaci Babydoppler Connect a zaregistrujte se.
 8. Chcete-li zařízení Babydoppler Connect používat s aplikací, zapojte dodaný kabel do příslušné zdířky na zařízení (4) a druhý konec připojte do konektoru vašeho tabletu / smartphonu. Do druhé zdířky zapojte dodaná sluchátka (4). Nakonec v aplikaci stiskněte tlačítko «Record your baby».
- Pro lepší poslech doporučujeme aktivovat režim «Airplane Mode».

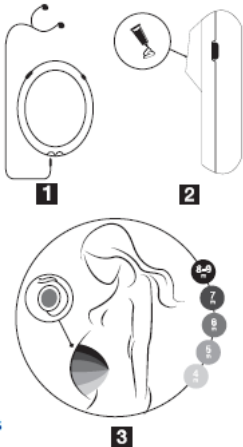

9. Stiskněte funkci «Register», pro uložení historie poslechlů.
10. Chcete-li srdeční tep svého miminka sdílet s někým jiným, použijte funkci «Your recordings». Klikněte na přehrání, které chcete sdílet, a pak klikněte na funkci sdílení «Share». Zvolte vysílací kanál (mail, MMS, sociální síť). Z tohoto rozhraní jste také schopni poslouchat nahrávku stisknutím funkce "Listen".

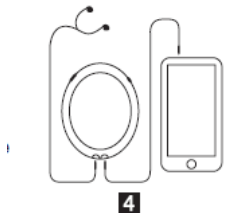

ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení vždy vypněte a vyjměte baterie. Pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte povrch zařízení a otřete sondu, abyste odstranili jakékoliv stopy ultrazvukového gelu. Je-li to nutné, vyčistěte měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě a okamžitě vysušte čistou látkou. K čištění nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je aceton nebo jakékoliv jiné abrazivní prostředky. Nedovoďte, aby kapalina pronikla dovnitř přístroje, neponořujte žádnou část zařízení do jakékoliv kapaliny. Pro dezinfekci a sterilizaci povrchu sondy použijte čistý 70% alkohol a nechte vyschnout nebo vytřete měkkým, suchým hadříkem.

Zařízení Babydoppler Connect je velmi křehké a mělo by se s ním manipulovat opatrně. Gel musí být odstraněn po každém použití Babydoppleru. Tato bezpečnostní opatření prodlouží životnost Babydoppleru. Uživatel musí také před manipulací zajistit, aby Babydoppler neobsahoval žádné zjevné poškození, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a správné fungování. Standardní doba provozu baterií je cca až 20 dní. Životnost tohoto zařízení je cca 10 let. Než začnete toto zařízením používat, vyčkejte cca 10 minut, aby dosáhlo okolní teploty. Doporučuje se kontrolovat správnou funkci přístroje v měsíčních intervalech. Zjistíte-li jakékoliv poškození, nadále přístroj nepoužívejte, doporučujeme přístroj nahradit jiným. Provádějte pravidelné bezpečnostní testy, aby se ujistili, že je zařízení izolováno proti elektrickému proudu. Doporučená frekvence je jednou za dva roky nebo podle směrnic země, v níž je zařízení používáno. Zařízení a příslušenství musí být likvidovány podle místních předpisů. Mohou být vráceny prodejci nebo výrobci k recyklaci nebo zlikvidovány odděleně. Babydoppler Connect a jeho mobilní aplikace neposkytují přesné údaje o srdečním rytmu plodu, poskytují pouze záznam zvuku. Není-li srdeční rytmus důvěryhodný, existují další metody kontroly (např. stetoskop). **Tento druh vyšetření je oprávněn provádět pouze lékař.**

MOŽNÉ POTÍŽE A JEJICH ŘEŠENÍ

V případě obtíží Babydoppler vypněte, vyjměte baterie a odpojte dodané kabely. Zapojte kabely zpět do smartphonu nebo tabletu a do svého Babydoppler, znovu nainstalujte baterie a znovu přístroj zapněte. Pokud se při použití Babydoppleru objeví následující problémy, zkuste je vyřešit pomocí následujících pokynů.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Zvuk je slabý	- Hlasitost je příliš nízká. - Baterie je příliš slabá. - Nepoužili jste ultrazvukový gel.	- Upravte hlasitost. - Vyměňte baterie. - Na sondu aplikujte gel.
Příliš velký hluk	- Hlasitost je příliš vysoká. - Napájení je nízké. - Rušení z externího signálu.	- Upravte hlasitost. - Vyměňte baterie. - Ujistěte se, že Váš smartphone nebo tablet je v režimu «Airplane Mode».
Příliš nízká citlivost	- Sonda není správně umístěna. - Neaplikovali jste ultrazvukový gel.	- Změňte umístění sondy. - Na sondu aplikujte gel.
Tlukot srdce není slyšet nebo nelze nahrát	- Sonda není správně umístěna. - Neaplikovali jste ultrazvukový gel. - Kabely nejsou správně zapojeny.	- Změňte umístění sondy. - Na sondu aplikujte gel. - Kabely zapojte správně.

ZÁRUKA

Aplikace Babydoppler Connect byla vyvinuta pro novou generaci smartphonů a tabletů a nové verze operačních systémů iOS/Android. BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY nemůže zaručit vynikající fungování aplikace Babydoppler Connect pro všechny smartphone/tablety dostupné na trhu a předchozí verze operačních systémů iOS/ Android. V každém případě může být Babydoppler Connect používán samostatně (bez připojení ke smartphonu/tabletu) spolu s dodanými sluchátky.